

誰とも会わずにいつでも受けられる

SARS-CoV-2  
新型コロナウイルス  
PCR検査  
唾液採取用  
検査キット

TOAMIT®  
東亜産業 新型コロナ  
PCR検査センター



ご自宅で  
簡単・手軽

※唾液を採取するだけの簡単な検査です。  
詳細については同梱の説明書をご覧ください。

唾液採取後  
キットを郵送

送料無料

※返信用封筒付  
(料金受取人払郵便)

ご返送いただいたキットを弊社受領後、

最短 **3時間後** 検査状況※をメールで通知  
(ご指定のメールアドレス/LINE/SMSにて)

※唾液検体につき、新型コロナウイルスに特徴的なRNAが検出されるかの、検査状況を(高リスク/低リスク)にてご報告いたします。 ※感染の有無については専門の病院又は最寄りの保健所にご相談ください。

PCR検査 唾液採取用キットセット販売価格 (ご自宅まで検査キットの送料520円別)

5キット以上の購入  
**3,800円(税別) / 1検査あたり**

★まとめて購入がお得！5キット以上の購入で**送料無料**！

おすすめポイント

- ① 診察不要・ご自宅で簡単！手軽に検査が可能**  
ご自宅からご郵送頂き、PCR検査所到着後、最短3時間後に通知！
- ② 唾液を摂取するだけ**  
唾液を摂取するだけです、痛みを伴わず簡単に検査！
- ③ お求めやすい低価格**  
今まで高額だったPCR検査がなんと3,800円(別)でご提供！
- ④ より正確な検査方法**  
唾液を直接、PCR検査にかけるのではなく、一度分離させ核酸抽出しそれからPCR検査にかけるのでより正確な検査レポート報告を実現！
- ⑤ 検査結果の確認はご本人のみ**  
検査結果は、ご自身の指定のメールまたはLINE等で通知しますので、第三者に知られることなく安心です！



注意事項

採取前30分程度は、飲食や歯磨き、うがい薬を使用したうがいはしないでください。また、採取時はなるべく清潔な環境で手を洗い、水で軽く口をゆすいであらってから採取してください。

PCR検査をするメリット

現状の感染の有無を調べることにより、他の人にうつしてしまい感染を広げるリスクを回避できます。

感染していないことを知ることで行動の制限を減少させることができ、普段と同じような社会的活動が行えます。

お客様や取引先、また社内やご家族の方々と健康状態を知った上で接触ができるので、営業活動の促進、会合などの催しやイベントの実施、社内の福利厚生などに活用いただけます。



自宅で簡単



いつでも好きな時に



結果確認は本人のみ

検査結果は厳重に取り扱い、お客様以外の第三者に報告することはございません。

検査結果→陽性の場合

お住まいの地域の保健所・病院にご連絡くださいますようお願いいたします。

※唾液検体の為、新型コロナウイルス感染症に特徴的なRNAが検出されるかという検査状況を、高リスク/低リスクで報告し、実際の感染有無については医療機関または最寄りの保健所で確認する必要があります。

■お申込み・お問い合わせは下記へ

申込QRコード

IWA Tours

株式会社 アイ・ダブリュー・エイ・ツアー

担当者：正森・古賀・森永

Tel.092-262-7778

E-mail : fukuoka@iwa-fuk.co.jp



検査の流れ

1 ご注文後、検査キット到着



2 検体(唾液)の採取



3 採取した唾液を梱包して返送



4 検体到着後、検査の実施



5 検査状況通知を受領



※メール、LINE、SMSなどで通知